



HIDRÁLCOL 70° INPM



Descrição / Indicação

Produto destinado para desinfecção de superfícies e equipamentos. Única e exclusivamente para uso em estabelecimentos de assistência à saúde. Seca rápido

Especificações:

Aspecto:	Líquido Límpido (solução aquosa)
pH a 25°C:	7,0 a 9,0
Cor / Odor	Incolor / Característico
Solubilidade em Água:	100%
Densidade (g/mL a 20°C)	0,850 – 0,900
Gradação Alcoólica 20°C	70,0 a 72,0° INPM

Composição

Álcool Etilico Hidratado 92,8° INPM e Água

Modo de Uso

- Utilizar o produto puro.
- Umedecer um pano com Hidralcol 70 e aplicar nas superfícies e deixar agir por no mínimo 10 minutos. Não derramar sobre o fogo

Precauções

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

NÃO INGERIR. CUIDADO! Perigosa a sua ingestão. Não inale. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos.

Se a irritação persistir consulte o médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

CUIDADO! INFLAMÁVEL! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente. Em caso de ingestão não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-0148110) ou Serviço de Saúde mais próximo. ATENÇÃO: Mantenha o produto em sua embalagem original. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Proibido reutilizar a embalagem. Manter afastado do fogo e do calor. “Não perfurar a tampa.”

Validade

VÁLIDO POR 24 MESES, a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

Embalagem	Nº Registrado ANVISA	Cod. de Barras EAN	Cod. de Barras DUN
Caixa de 12 x 1 L	3.0524.0028.001-8	07898005490529	37898005490520
Caixa de 4 x 5 L		07898005490222	57898005490227